



# PLUM

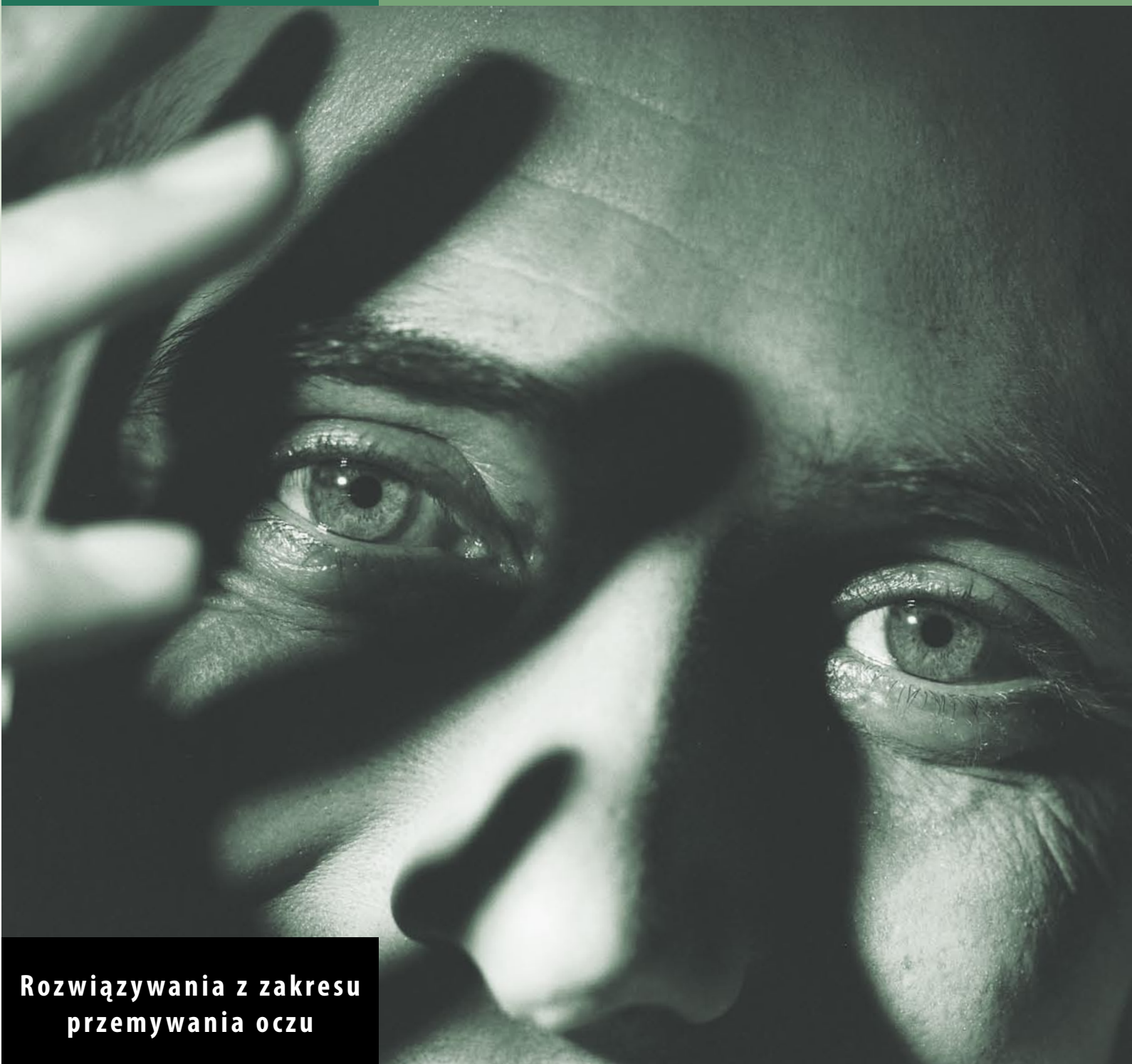

Rozwiązywania z zakresu przemywania oczu

Skuteczna pierwsza pomoc

# przy obrażeniach oka i ciała

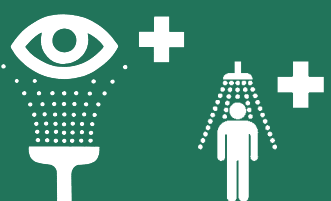

## Prosty i łatwy w użyciu!



Wymij butelkę ze stacji pianowo



Przekręć nakrętkę do zerwania plomby



Odchyl głowę i przepłukuj




W związku z obecnością ciał obcych w oczach, wskazane jest podczas przepłukiwania odchylić głowę do tyłu.

### Ważne:

Związku z urazami wszelkiego rodzaju, płyn do płukania oka musi zawsze wypływać i wpływać do oka w sposób delikatny. Naciśnij delikatnie butelkę, nie ściskaj jej


Nie przerywając płukania skontaktuj się z lekarzem.

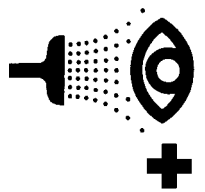

## Plan pierwszej pomocy Obrażenia oczu

**PLUM**  
www.plum.dk

SUBSTANCJA	PŁYN DO PŁUKANIA	PŁUKANIE	CZAS PŁUKANIA
Ciała obce Kurcz, brud, opiłki metalu oraz odłamki drewna itp.	Plum Eye Wash	Plum Eye Wash	Przepłukuj oko Plum Eye Wash dopóki obce ciało nie zostanie wypłukane
Kwasy	pH Neutral	Plum Eye Wash	Przepłukuj oko płynem pH Neutral przez ok. 2 minuty, kontynuuj płukanie stosując Plum Eye Wash do momentu poprawy lub do momentu uzyskania pomocy lekarskiej.
Alkalia	pH Neutral	Plum Eye Wash	Przepłukuj oko płynem pH Neutral przez ok. 2 minuty, kontynuuj płukanie stosując Plum Eye Wash do momentu uzyskania pomocy lekarskiej.
Inne chemikalia	Plum Eye Wash lub pH Neutral	Plum Eye Wash	Przepłukuj oko do momentu poprawy lub do momentu uzyskania pomocy lekarskiej.
Chemikalia na Twojej skórze	pH Neutral	Plum Eye Wash	Kontynuuj przepłukiwanie do momentu poprawy

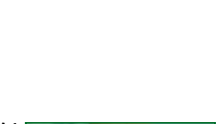

**Ważne!**

Płyn do płukania oka zawsze wypływa i wpływa do/z oka w sposób delikatny. Naciśnij delikatnie butelkę, nie ściskaj jej.

# PLUM

Soko International  
Polarczyk Tober Sp. J.  
05-800 Pruszków  
Ul. Parzniewska 2  
Tel. 022 7596072  
www.soko.pl



# Wyostrz wzrok

na bezpieczeństwo. Kilka sekund może decydować!

Wzrok jest jednym z naszych najważniejszych zmysłów.

Gdy zdarzy się wypadek, kilka sekund może decydować, czy stracisz wzrok czy nie. Szybki dostęp do środków przepłukujących oczy jest niezmiernie ważny w miejscach pracy, w których oko narażone jest na urazy.


Wypadki z chemikaliami

Urazy spowodowane kwasami lub substancjami alkalicznymi powodują niszczenie tkanki w momencie, gdy substancja dostaje się do oka.

W takich wypadkach zalecamy nasz pH Neutral, który jest fosforanowym roztworem buforowym (4.9%). pH Neutral błyskawicznie i delikatnie neutralizuje płyn w oku do jego normalnego poziomu pH, to jest 7.4.

Uraz mechaniczny

Czas jest równie istotnym czynnikiem w wypadkach spowodowanych metalem czy odłamkami drewna, kurzem lub zabrudzeniami itp. W takich sytuacjach, używając środków przepłukujących oczy można zapobiec przylepieniu się substancji obcej do oka i tym samym poważnym urazom. Plum Eye Wash zawiera sterylny roztwór chlorku sodu (0.9%) odpowiadający naturalnemu płynowi w gałce ocznej. Delikatnie wypłukuje oko i zapobiega dalszemu zanieczyszczeniu.

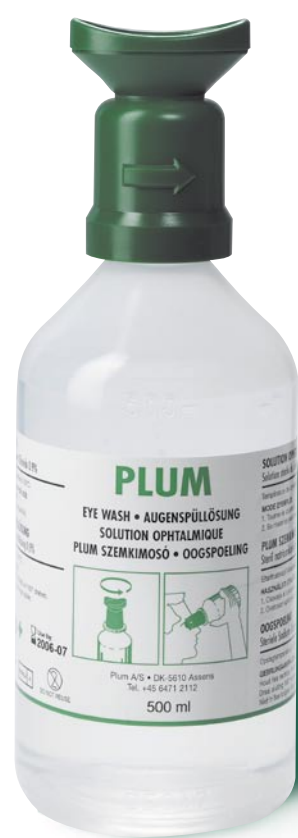

Zalety Plum Eye Wash:

Szeroki zakres przeznaczenia

Można stosować do zwykłego przepłukania oczu, neutralizacji kwasów lub substancji alkalicznych w gałce ocznej, do neutralizacji substancji żrącej (kwas, zasada) na ciele.

Możliwości rozwiązań

Szeroki wachlarz produktów zapewni Ci optymalne rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb. Oferta zawiera stacje różnych rozmiarów do montowania na ścianie w miejscu pracy, niewielkie jednostki do umieszczenia w pojazdach, skrzynce narzędziowej, apteczce pierwszej pomocy lub w futerałach mocowanych do paska.

Sterylny i higieniczny

Okres trwałości – 3 lata. Buteleczki nie wymagają żadnej konserwacji lub czyszczenia. Data ważności podana jest na etykiecie.

Szybki i łatwy w użyciu

W razie wypadku przepłukanie oka lub ciała jest możliwe w kilka sekund. Zawiera precyzyjne i bardzo jasne wskazówki użycia. Tekst i piktogramy znajdują się na opakowaniu.

Wysoki poziom funkcjonalności

Ergonomiczne końcówki dostosowane do kształtu oka umożliwiają delikatne i precyzyjne przepłukiwanie.

Produkt sterylny posiada znak CE zgodnie z przepisami dotyczącymi sprzętu medycznego.

Prostota – bezpieczeństwo - elastyczność

Rozwiązania z zakresu przepłukiwania – ciała obce



500 ml Plum Eye Wash



Buteleczka zawiera 0.9% sterylny roztwór chlorku sodu. Komplet zawiera ergonomiczną końcówkę dostosowaną do kształtu oczu, zamknięcie uniemożliwiające dostanie się kurzu oraz czytelną instrukcję. Butelki montowane także w stacjach. Trwałość: 3 lata. Produkt posiada znak CE

Czas przepłukiwania:  
W przybliżeniu 5 min.  
Art. Nr 4702  
Opakowanie: 12 x 500 ml

Stacja Plum Eye Wash z jedną butelką



Stacja do montażu na ścianie zawiera 1x500 ml Plum Eye Wash, uchwyt i piktogram. Doskonala w miejscach pracy, gdzie wymagane jest natychmiastowe przepłukanie oczu, odpowiednia do mniejszych zakładów pracy i na mobilnych stanowiskach pracy.

Czas przepłukiwania:  
W przybliżeniu 5 min.  
Art. Nr 4704  
Opakowanie: 1 sztuka

Stacja Plum Eye Wash z dwoma butelkami



Stacja do montażu na ścianie zawiera 2x500 ml Plum Eye Wash, lusterko i instrukcje przemywania oczu. Nadaje się szczególnie do miejsc produkcyjnych gdzie występuje duża ilość brudu i kurzu przy mobilnych stanowiskach pracy. Dostępna także z elementem nagrzewającym dla mocy 12 lub 24 V.

Czas przepłukiwania  
W przybliżeniu 10 min.  
Art. Nr 4703  
Opakowanie: 1 sztuka

200 ml Plum Eye Wash



Mała, poręczna butelka zawiera 0.9% sterylny roztwór chlorku sodu. Butelka jest idealna do noszenia na pasku w specjalnych futerałach, w apteczkach pieszej pomocy lub skrzynkach narzędziowych. Komplet z ergonomiczną końcówką dostosowaną do kształtu oczu, zamknięciem uniemożliwiającym dostanie się kurzu oraz wyraźną instrukcją. Trwałość: 3 lata. Produkt posiada znak CE

Czas przepłukiwania:  
W przybliżeniu 2 min.  
Art. No. 4701  
Opakowanie: 10 x 200 ml

Stacja Plum Eye Wash z dwoma butelkami



Wygodna stacja do przemywania oczu, może być łatwo instalowana w pobliżu stanowiska pracy. Stacja jest wyposażona w 2x500ml Plum Eye Wash, lusterko i instrukcje zapewniające szybkie i prawidłowe przemywanie oczu. Nie nadaje się do miejsc pracy o dużej ilości brudu i kurzu.

Czas przepłukiwania:  
W przybliżeniu 10 min.  
Art. Nr 4694  
Opakowanie: 1 sztuka

Futerał do butelki 200ml



Praktyczny futerał na butelki 200ml. Łatwo się otwiera, zapewnia bezpieczną i higieniczną ochronę butelce.

Art. Nr 4692  
Opakowanie: 10 sztuk

Rozwiązania z zakresu przepłukiwania – kwasy i alkalia



200 ml pH Neutral



Mała, poręczna butelka, zawiera 4.9% sterylny roztwór buforowany, pozwala na szybką neutralizację płynów w oku. Neutralizuje płyny w zakresie pH 1-14 w ciągu mniej niż 2 minuty. Buteleczka może być przenoszona w futerałach na pasku, w apteczce czy skrzynce narzędziowej. Urządzenie dostępne także do montażu na ścianie. Butelka jest z ergonomiczną końcówką dostosowaną do kształtu oka, zawiera zamknięcie uniemożliwiające dostanie się kurzu. Trwałość: 3 lata. Produkt posiada znak CE.

Czas przepłukiwania:  
W przybliżeniu 2 min.  
Art. 4753  
Opakowanie: 10 x 200 ml

Stacja Plum Emergency Eye Wash



Otwarta stacja Plum Eye Wash z 200 ml pH Neutral i 500 ml Plum Eye Wash. Odpowiednia szczególnie do miejsc produkcyjnych gdzie występuje duże ryzyko wystąpienia zagrożeń na skutek kwasów i zasad. Stacja jest wyposażona w lusterko i czytelną instrukcję użycia. Nie nadaje się do bardzo zakurzonych i brudnych miejsc pracy.

Czas przepłukiwania:  
W przybliżeniu 7 min.  
Art. Nr 4769  
Opakowanie: 1 sztuka

Stacja Plum Emergency Eye Wash



Odporna na zakurzenie stacja zawierająca 200 ml pH Neutral i 500 ml Plum Eye Wash. Dla optymalnego bezpieczeństwa, wszędzie tam gdzie występuje ryzyko urazów na skutek obecności kwasów i zasad. Stacja wyposażona jest w piktogram z przodu oraz lusterko wewnątrz stacji. Dostępna także z elementem nagrzewającym dla mocy 12 lub 24 V.

Czas przepłukiwania:  
W przybliżeniu 2 min. dla pH Neutral,  
5 min. dla Plum Eye Wash  
Art. Nr. 4784  
Opakowanie: 1 sztuka

1 litrowy pH Neutral Emergency Shower



Butelka zawiera 4.9% sterylny roztwór buforowany, który neutralizuje nawet najbardziej stężone kwasy i alkalia. Do 50 razy bardziej efektywny niż zwykła woda. Butelka jest wyposażona w dyszę sprayu, która umożliwia dystrybucję płynu szybko, nawet na dużą powierzchnię ciała. Odpowiedni jako wkład Stacji pH Neutral Emergency Shower umieszczanej w pobliżu miejsca pracy, w skrzynce na narzędzia, w pojeździe itp. Produkt posiada znak CE.

Czas przepłukiwania:  
W przybliżeniu 2 min.  
Art. Nr. 4735  
Opakowanie: 6 x 1 litr

Stacja pH Neutral Emergency Shower



Stacja pH Neutral shower. Stacja do montażu na ścianie zawiera 1 litr pH Neutral, uchwyt oraz piktogram. Odpowiednia do montowania w pobliżu miejsca pracy.

Czas przepłukiwania:  
W przybliżeniu 2 min.  
Art. 4734  
Opakowanie: 1 sztuka

elastyczny program